



Bienvenido a

ElipseTM

Program

Sin cirugía,
sin endoscopia*,
sin anestesia
Solo resultados**




*Solo en muy raros casos, el balón Elipse puede requerir endoscopia o intervención quirúrgica para su extracción.

**El resultado varía de un paciente a otro. Un pequeño porcentaje de pacientes no responde al tratamiento.

Este material no tiene un público objetivo estadounidense. Este material describe nuestro producto, que no está aprobado ni autorizado para su comercialización por la FDA de EE.UU. Nuestro producto no está disponible para su venta en EE.UU.

Antes de que empecemos...

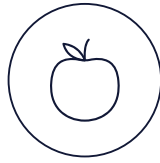


01 ¿Qué soluciones para perder peso ha probado hasta ahora?

02 ¿Qué objetivo de pérdida de peso quiere alcanzar con el Programa Elipse?



No está solo

Sobrepeso y obesidad
Una epidemia global

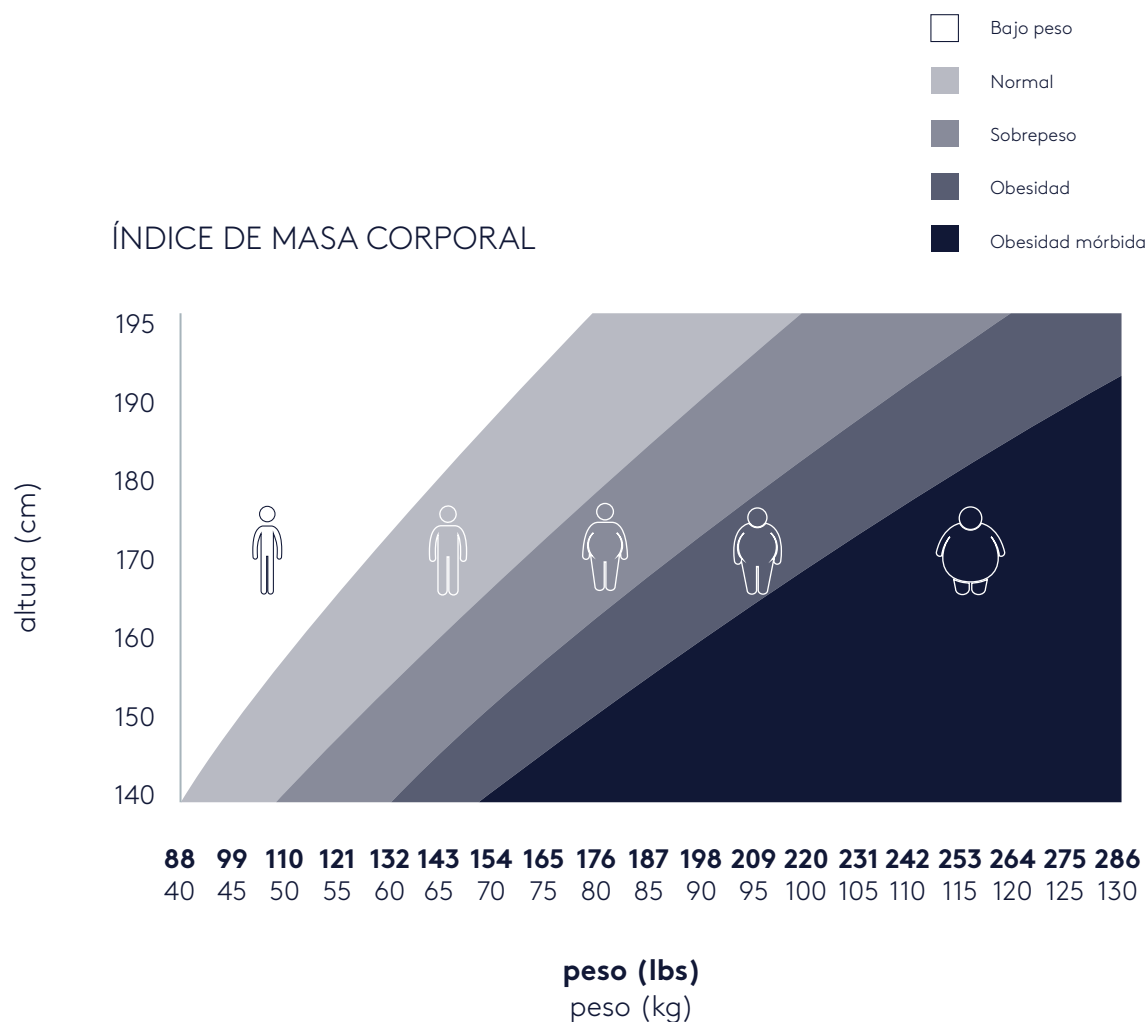


1 de cada 3

personas tiene sobrepeso o es obesa en Francia, Italia, Alemania, España, Reino Unido, China y UAE*


*Basado en datos de la OMS, Eurostat y datos censales de EE.UU.

Los efectos de la obesidad son multidimensionales

El sobrepeso no solo tiene un impacto en nuestro aspecto, sino también en nuestra salud

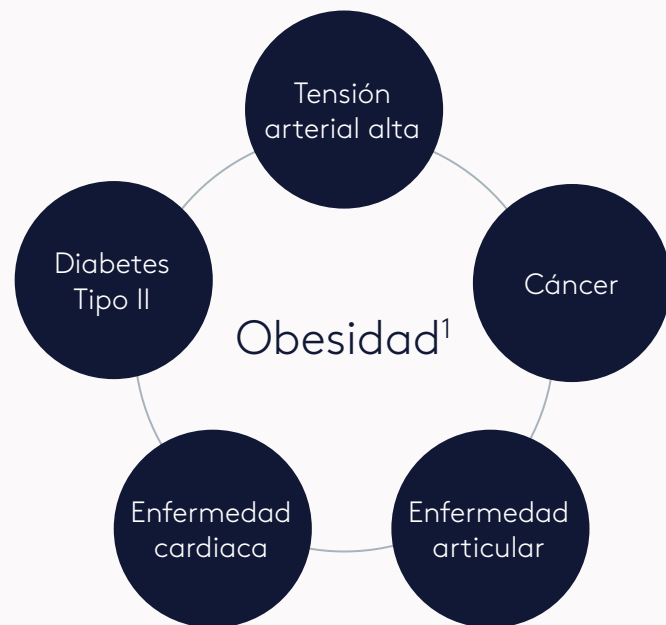

COMPLICACIONES MÉDICAS DE LA OBESIDAD

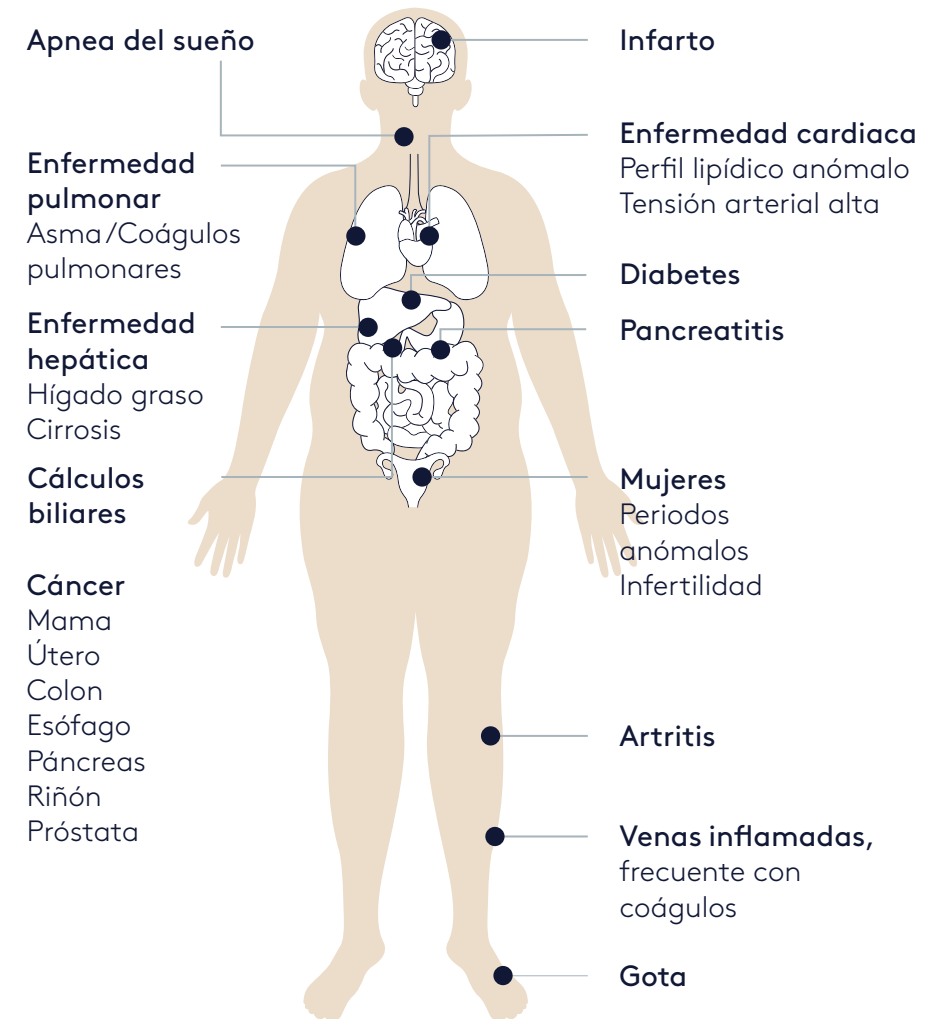


1. Efectos del sobrepeso y la obesidad en la salud <https://www.cdc.gov/healthyweight/effects/index.html>. Último acceso el 7 de abril de 2019

¿Le frustran los programas de pérdida de peso?

De acuerdo con los estudios de mercado de Allurion, la mayoría de opciones de tratamiento disponibles no cumplen las expectativas

SATISFACCIÓN CON SOLUCIONES DE PÉRDIDA DE PESO (WL)
Puntuación 1-10 - De quienes han usado

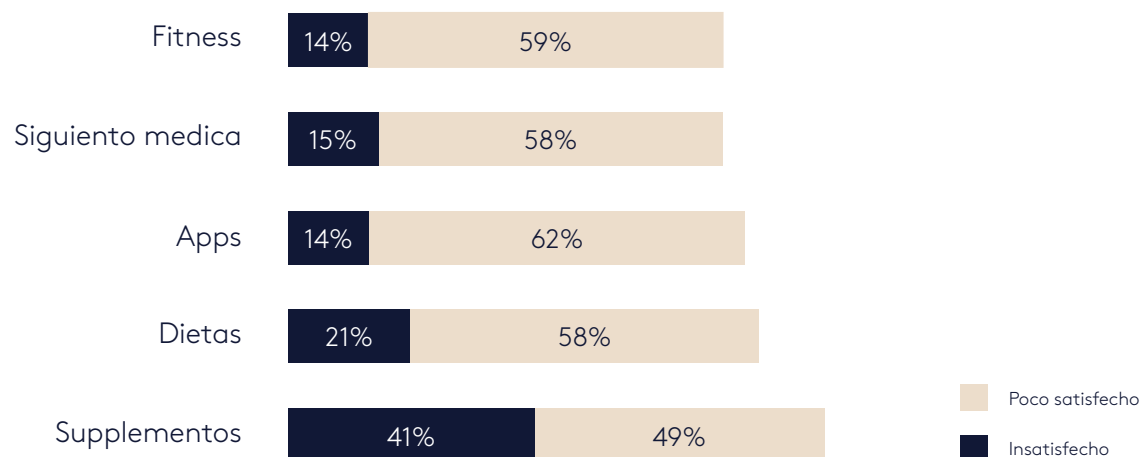

P10. ¿Qué es lo que espera de un tratamiento de pérdida de peso administrado por un médico/profesional de la salud?
Datos globales. Base: n=2461. Es probable que pregunte al HCP sobre una solución no probada.



76%

no plenamente satisfecho
con soluciones de pérdida
de peso intentadas
previamente

Estudio de mercado de Allurion; 9.800 entrevistados; 8 zonas geográficas; octubre de 2018
P3C. En una escala de 1 a 10, donde 1 significa muy insatisfecho y 10 muy satisfecho, ¿cuál es su satisfacción con relación a lo siguiente? Piense en su experiencia a lo largo de todo el proceso. Nivel global. Base: n=4831
Satisfecho: 8-10/10, ni satisfecho ni insatisfecho 4-7/10, insatisfecho 1-3/10

Introducción del Programa Elipse

Un programa con soporte diseñado para usted



Sin
cirugía

Sin
endoscopia*

Sin
anestesia

*Solo en muy raros casos, el balón Elipse puede requerir endoscopia o intervención quirúrgica para su extracción

¿Qué es?

El programa de pérdida de peso Elipse ha demostrado la eficacia y seguridad de dicho procedimiento ambulatorio




Después de unas 16 semanas de tratamiento con Elipse, los pacientes pierden una media de **10 a 15 kg** y un **10 al 15%** de su peso corporal^{1 a 10}

1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Abr;29(4):1236-1241.
2. Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul;13(7):1174-1182.
3. Al Sabah, S., et al. SOARD. 2018, 14(3), 311-317.
4. Machytka E et al. Endoscopy. 2017 Feb;49(2):154-160.
5. Genco et al. Obes Surg 2017, DOI 10.1007/s11695-017-2877-1
6. Al-Subaie S et al. Int J Surg. 2017 Dic;48:16-22.



Obtenga un asesoramiento multidisciplinar durante su proceso de pérdida de peso^{*}

7. Ienca et al. Enviado a SOARD. Abstract A278, presentado en la Semana de la Obesidad, 2018, Nashville, EE.UU.
8. Genco et al. Enviado a SOARD. Abstract A185, presentado en la Semana de la Obesidad, 2018, Nashville, EE.UU.
9. Ienca et al. Abstract 237, presentado en IFSO 2019, Madrid, España.
10. Raftopoulos et al. Abstract 1978. Presentado en ACS 2019, San Francisco, EE.UU.

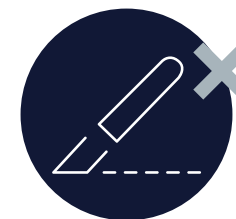


Descubra una sencilla revolución: sin cirugía, endoscopia ni anestesia^{**}

^{*}El balón Elipse debe combinarse con un programa supervisado de nutrición y modificación del comportamiento. Allurion recomienda un programa de seguimiento de 6 meses. La duración del programa es a discreción del médico y puede cambiar en función del perfil del paciente.

^{**}Solo en muy raros casos, el balón Elipse puede requerir endoscopia o intervención quirúrgica para su extracción.

¿Cómo?

Los balones gástricos inducen la pérdida de peso al incrementar la sensación de saciedad, retrasando la evacuación gástrica y reduciendo la cantidad de alimentos ingeridos en cada comida¹

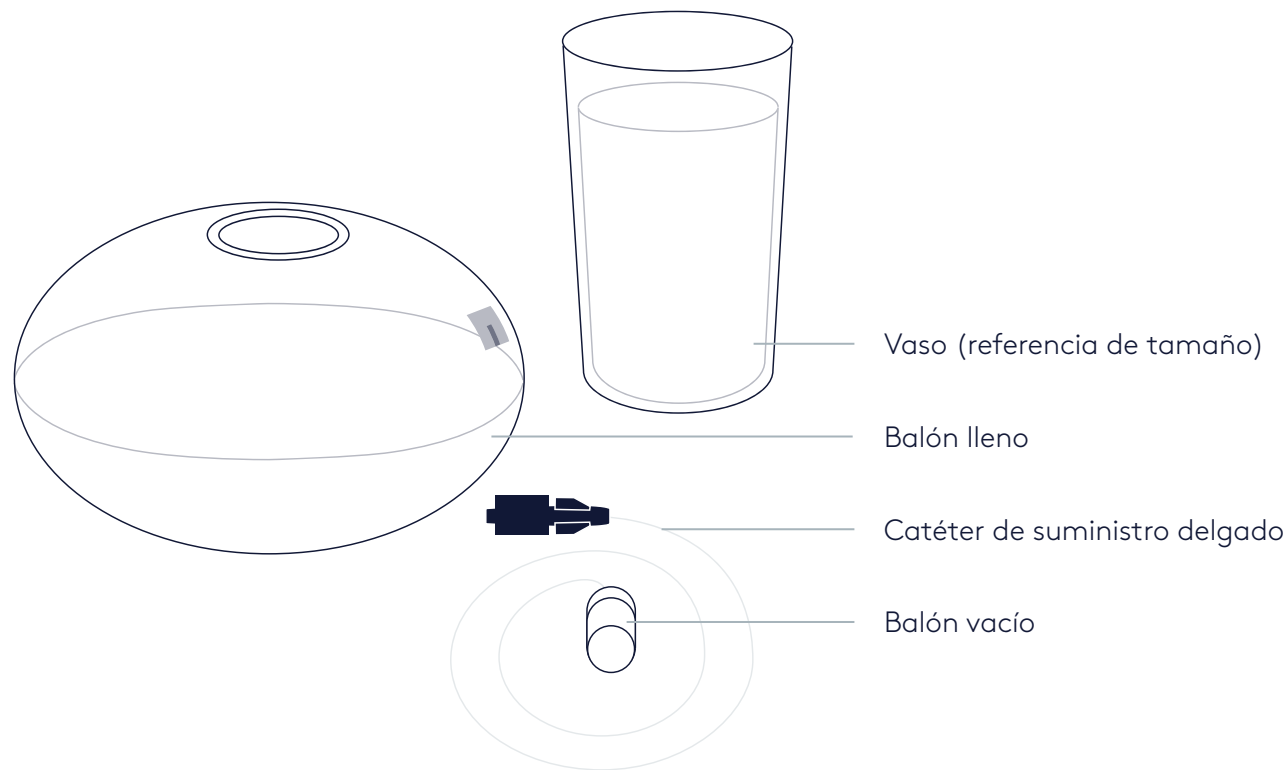

20 min

La experiencia del balón Elipse tiene lugar durante una breve visita de 20 minutos²

1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Abr;29(4):1236-1241
2. Clinical Trial Reports: DAA069 y DAA105

¿Cómo?


Los balones gástricos ofrecen una «luna de miel lejos del hambre»¹



01

Traga una cápsula que contiene el balón unido a un tubo delgado

Le hacen una radiografía para comprobar que la cápsula está en su posición correcta

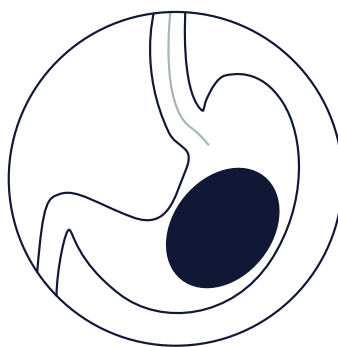


02

Una vez que la cápsula llega al estómago, el médico utiliza el tubo para llenar el balón de líquido

Le hacen una segunda radiografía para confirmar que el balón está lleno. El médico retira el tubo con cuidado y comienza la pérdida de peso

Con el balón dentro del estómago, comerá menos sin sentir hambre

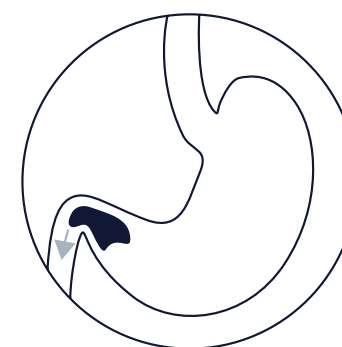

03

Al cabo de 16 semanas después de su colocación, el balón Elipse se vacía y elimina por sí solo^{2*}


1. Cita de Lucy Jones, dietista
<http://www.lucyjonesdietitian.co.uk/>

2. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Abr;29(4):1236-1241

*Solo en muy raros casos, el balón Elipse puede requerir endoscopia o intervención quirúrgica para su extracción. Hable hoy mismo con su médico para saber si el Programa Elipse es adecuado para usted. También puede obtener más información en www.allurion.com.

¿Cómo funciona el balón Elipse?

El balón ocupa espacio en su estómago e induce la pérdida de peso al incrementar la sensación de saciedad, retrasar la evacuación gástrica y reducir la cantidad de alimentos ingeridos en cada comida¹

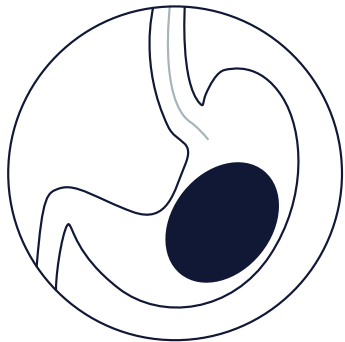

- Siéntase satisfecho más pronto → Porciones más pequeñas
- Crea una sensación de saciedad → Puede reducir los antojos
- Los alimentos permanecen más tiempo en el estómago → Puede reducir las comidas entre horas

¿Cuánto peso estima que perderá?



16 semanas

Después de unas **16 semanas** de tratamiento con Elipse, los pacientes pierden una media de **10 a 15 kg**^{1 a 10}


1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Abr;29(4):1236-1241.
2. Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul;13(7):1174-1182.
3. Al Sabah, S., et al. SOARD. 2018, 14(3), 311-317.
4. Machytka E et al. Endoscopy. 2017 Feb;49(2):154-160.
5. Genco et al. Obes Surg 2017, DOI 10.1007/s11695-017-2877-1
6. Al-Subaie S et al. Int J Surg. 2017 Dic;48:16-22.



-15%

o aproximadamente un **10 a 15%** de su peso corporal total^{1 a 10}

7. Ienca et al. Enviado a SOARD. Abstract A278, presentado en la Semana de la Obesidad, 2018, Nashville, EE.UU.
8. Genco et al. Enviado a SOARD. Abstract A185, presentado en la Semana de la Obesidad, 2018, Nashville, EE.UU.
9. Ienca et al. Abstract 237, presentado en IFSO 2019, Madrid, España.
10. Raftopoulos et al. Abstract 1978. Presentado en ACS 2019, San Francisco, EE.UU.

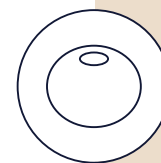

15k+

Los Balones Elipse ya se han distribuido* en Europa y Oriente Medio para ayudar a pacientes a alcanzar un peso más saludable**

*As of September 2019

**Results may vary from one patient to another.

A small percentage of patients don't respond to the treatment



Un balón temporal no significa una pérdida de peso temporal

Pierda peso y no vuelva a engordar

72%

de la pérdida de peso promedio se consiguió con

12 mes de seguimiento





Un estudio clínico con 95 pacientes demostró que el 72% de la pérdida de peso promedio con Elipse se consigue con un seguimiento de 12 meses¹

12

Modificación del estilo de vida

Cuando se combina con una modificación del estilo de vida durante 16 semanas, produce una pérdida de peso significativa frente a la modificación del estilo de vida por sí sola^{1*}

PORCENTAJE DE PACIENTES QUE CONSIGUE PERDER UN 10% DE SU PESO CORPORAL TOTAL EN 16 SEMANAS

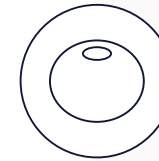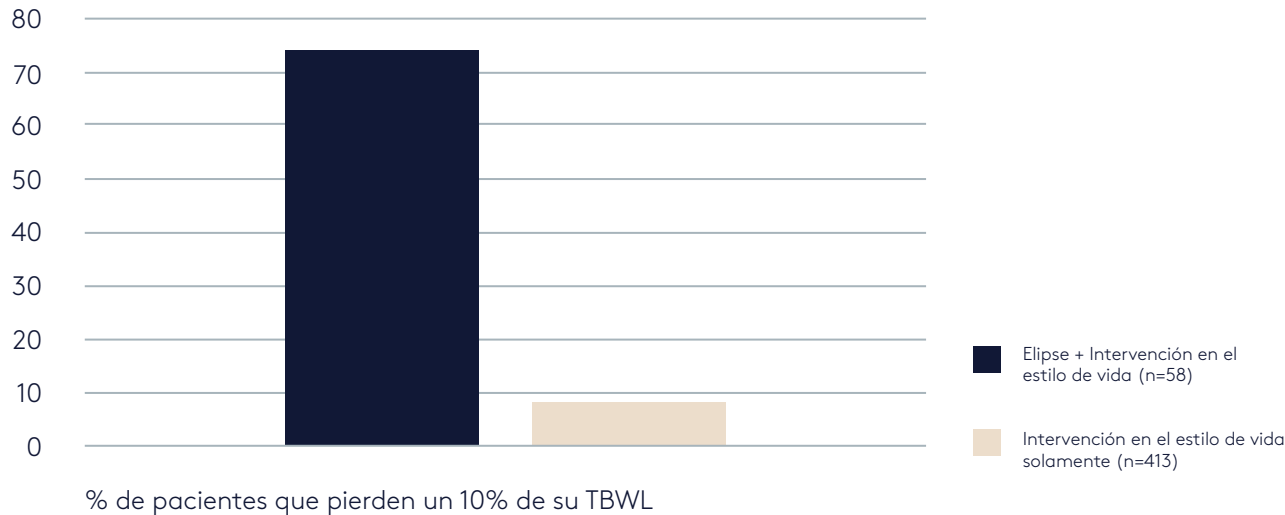

La modificación del estilo de vida incluyó un programa de modificación estructurado del comportamiento, la nutrición y la actividad física

1. Raftopoulos et al. Abstract 1978. Presentado en ACS 2019, San Francisco, EE.UU.

*El balón Elipse debe combinarse con un programa supervisado de nutrición y modificación del comportamiento. Allurion recomienda un programa de seguimiento de 6 meses. La duración del programa es a discreción del médico y puede cambiar en función del perfil del paciente.

Apoyo de expertos

El balón Elipse representa el elemento más importante de un programa de pérdida de peso multidisciplinar



Supervisión
de su médico



6 meses de
asesoramiento
nutricional realizado
por un nutricionista
experto*




Balanza «inteligente»
conectada y app móvil
para supervisar su
progreso

*El balón Elipse debe combinarse con un programa supervisado de nutrición y modificación del comportamiento. Allurion recomienda un programa de seguimiento de 6 meses. La duración del programa es a discreción del médico y puede cambiar en función del perfil del paciente.

Diez pasos al éxito

Elipse es un programa con apoyo para modificar su estilo de vida

6 plan mensual**

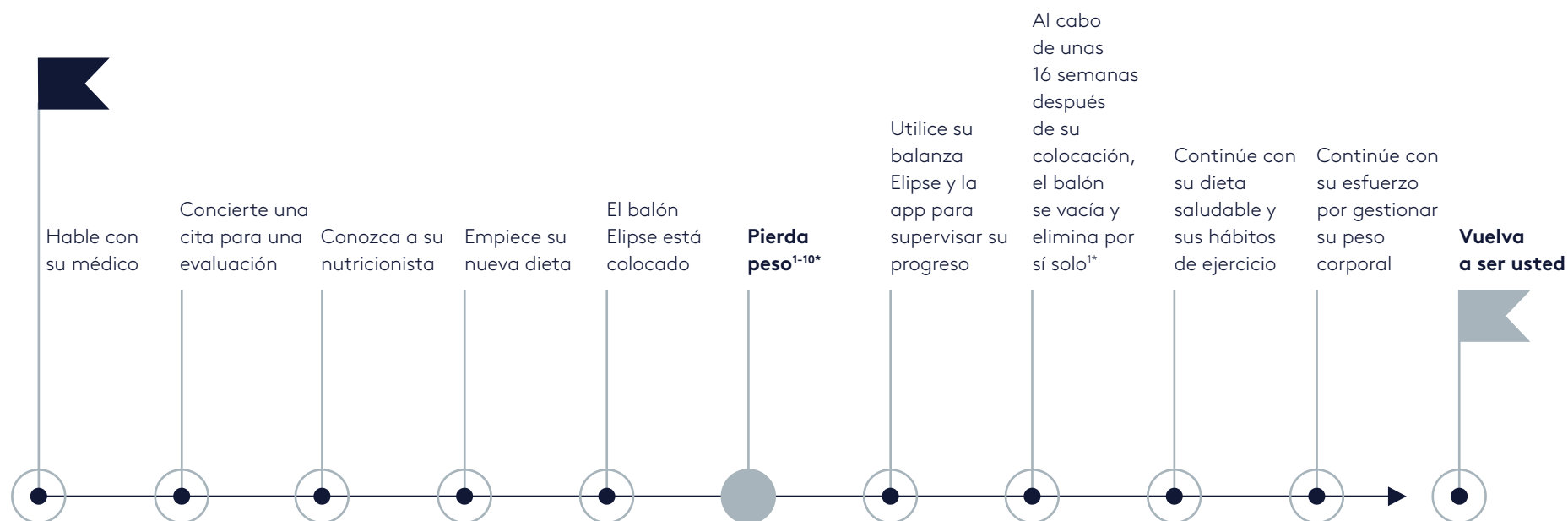

*El resultado varía de un paciente a otro.

Un pequeño porcentaje de pacientes no responde al tratamiento.

**El balón Elipse debe combinarse con un programa supervisado de nutrición y modificación del comportamiento. Allurion recomienda un programa de seguimiento de 6 meses.

La duración del programa es a discreción del médico y puede cambiar en función del perfil del paciente.

1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Abr;29(4):1236-1241

2. Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul;13(7):1174-1182.

3. Al Sabah, S., et al. SOARD. 2018, 14(3), 311-317.

4. Machytka E et al. Endoscopy. 2017 Feb;49(2):154-160.

5. Genco et al. Obes Surg 2017, DOI 10.1007/s11695-017-2877-1

6. Al-Subaie S et al. Int J Surg. 2017 Dic;48:16-22.

7. Ienca et al. Enviado a SOARD. Abstract A278, presentado en la Semana de la Obesidad, 2018, Nashville, EE.UU.

8. Genco et al. Enviado a SOARD. Abstract A185, presentado en la Semana de la Obesidad, 2018, Nashville, EE.UU.

9. Ienca et al. Abstract 237, presentado en IFSO 2019, Madrid, España.


10. Raftopoulos et al. Abstract 1978. Presentado en ACS 2019, San Francisco, EE.UU.

El Programa Elipse


Un programa de pérdida de peso completo



Mantenga la motivación
supervisando su progreso
todas las semanas

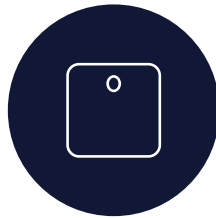

Utilice su balanza
inalámbrica y app fácil
de usar para registrar
los datos en tiempo
real: IMC, peso, grasa
corporal y más

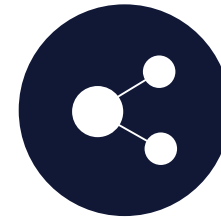

Envíe su progreso a su
médico, su familia y
sus amigos

¿Qué preguntan los pacientes?

¿Tiene alguna pregunta que hacer en este momento?


¿En qué medida se utiliza el balón Elipse?

- El balón Elipse ha sido probado exhaustivamente y los numerosos estudios clínicos demuestran que es seguro^{1 a 10}
- En la Unión Europea se utiliza desde 2015



100+

Se utiliza en más de 100 centros de pérdida de peso en Europa y Oriente Medio*

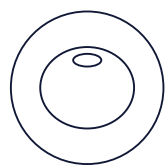

15k+

balones colocados en todo el mundo*

A diferencia de otros balones gástricos, Elipse es el único que no requiere un procedimiento médico invasivo**




*A septiembre de 2019

**Solo en muy raros casos, el balón Elipse puede requerir endoscopia intervención quirúrgica para su extracción.

1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Abr;29(4):1236-1241
2. Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul;13(7):1174-1182.
3. Al Sabah, S., et al. SOARD. 2018, 14(3), 311-317.
4. Machytka E et al. Endoscopy. 2017 Feb;49(2):154-160.
5. Genco et al. Obes Surg 2017, DOI 10.1007/s11695-017-2877-1
6. Al-Subaie S et al. Int J Surg. 2017 Dic;48:16-22.

7. Ienca et al. Enviado a SOARD. Abstract A278, presentado en la Semana de la Obesidad, 2018, Nashville, EE.UU.
8. Genco et al. Enviado a SOARD. Abstract A185, presentado en la Semana de la Obesidad, 2018, Nashville, EE.UU.
9. Ienca et al. Abstract 237, presentado en IFSO 2019, Madrid, España.
10. Raftopoulos et al. Abstract 1978. Presentado en ACS 2019, San Francisco, EE.UU.

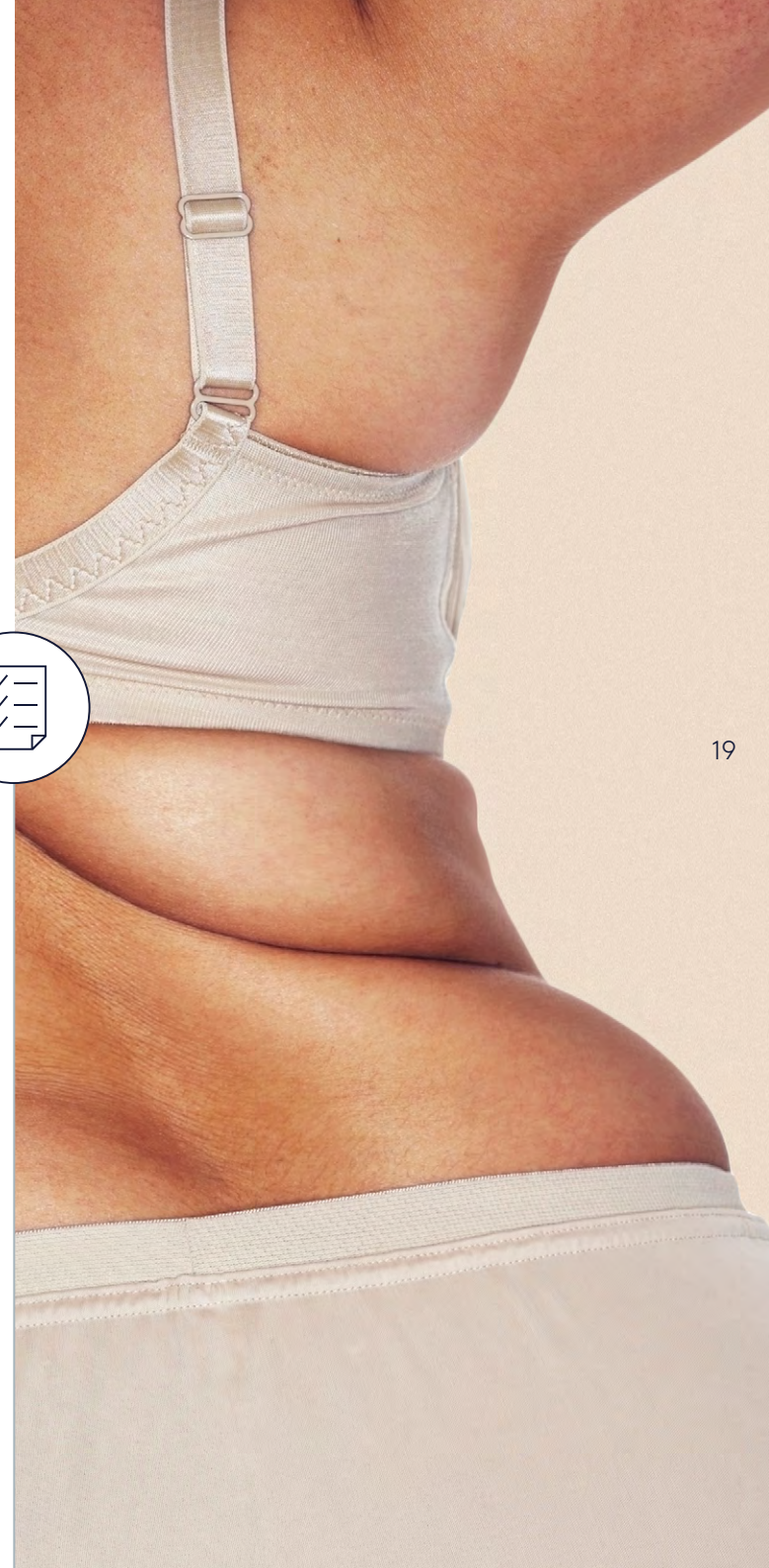


Perfil de seguridad sobre Elipse

Datos de seguimiento interno de Allurion

≈ 98%

Sin efectos secundarios observados

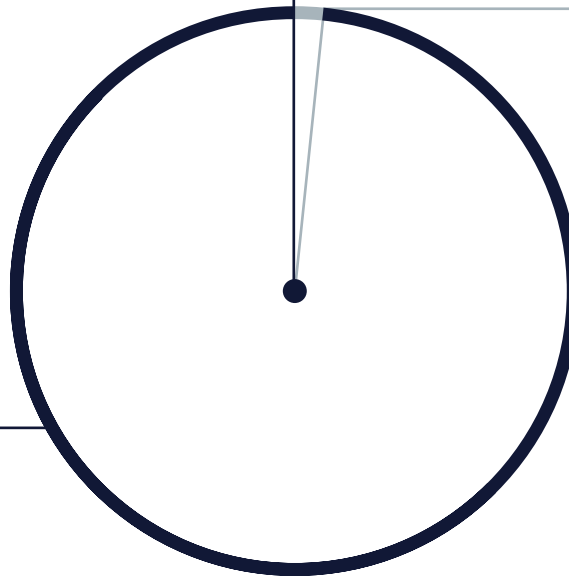

ÍNDICE EFECTOS SECUNDARIOS (%)
MARZO 2016 – JUNIO 2019

Total de unidades distribuidas = 15 200

Se han comunicado efectos secundarios en menos del 2% del total de balones Elipse colocados

Los 10 tipos más relevantes

Desinflado prematuro 0,43%
Intolerancia 0,25%
Obstrucción del intestino delgado 0,11%
Hiperinflación 0,05%
Disfagia 0,05%
Obstrucción de salida gástrica 0,03%
Perforación gástrica 0,02%
Vaciado incompleto del dispositivo 0,02%
Pancreatitis 0,01%
Gastroparesis 0,01%


20

Solo en muy raros casos, el balón Elipse puede requerir endoscopia o intervención quirúrgica para su extracción. Algunos individuos pueden no ser aptos para recibir el balón Elipse. El médico leerá su historial médico y le hará un examen físico para determinar si es apto. El balón Elipse es una ayuda temporal para perder peso destinado a adultos mayores de 18 años que sean obesos o tengan sobrepeso, según se determina con un índice de masa corporal (IMC) ≥ 27 . La colocación del balón Elipse está reservada a profesionales sanitarios que estén familiarizados con el uso del mismo.

El balón Elipse debe combinarse con un programa supervisado de nutrición y modificación del comportamiento. Allurion recomienda un programa de seguimiento de 6 meses. La duración del programa es a discreción del médico y puede cambiar en función del perfil del paciente.

En muy raros casos, el balón vacío puede ser vomitado, en vez de pasar por el tracto gastrointestinal. Aunque desconcierte al paciente, vomitar el balón no se ha asociado con ningún efecto secundario comunicado hasta la fecha.

¿Si no puedo tragar la cápsula?

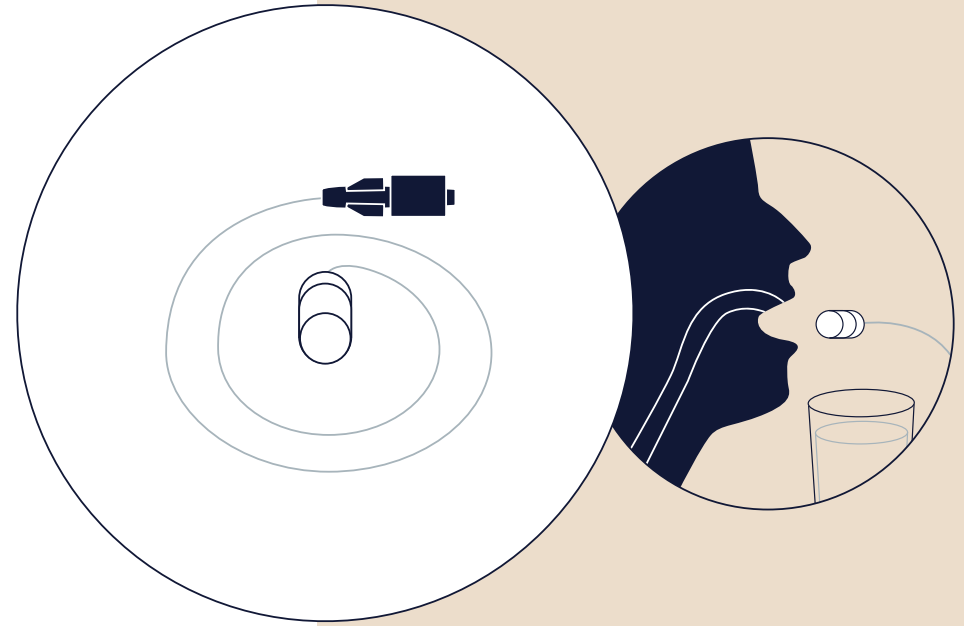

- La mayoría de personas ingiere la cápsula sin ningún problema¹
- Existe la posibilidad de su ingestión asistida:
- Si tiene algún problema en tragar la cápsula, el médico puede asistirle usando un cable delgado para aumentar ligeramente la rigidez del catéter

En un estudio clínico reciente con 1623 pacientes²

un 99,9% fue capaz de ingerir el dispositivo y solo un 32% necesitó asistencia con un estilete

1. Informe interno de Allurion: DAA069

2. Ienca et al. Abstract 237, presentado en IFSO 2019, Madrid, España.

¿Cuánto tiempo permanece introducido el balón?

Después de unas

16 semanas

la válvula de descarga activada por tiempo del balón lo desinflará automáticamente. Después lo eliminará naturalmente con las heces^{1*}

En un estudio

45%


de los pacientes no notó la eliminación del balón¹

1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Abr;29(4):1236-1241


*Solo en muy raros casos, el balón Elipse puede requerir endoscopia o intervención quirúrgica para su extracción. Hable hoy mismo con su médico para saber si el Programa Elipse es adecuado para usted. También puede obtener más información en www.allurion.com.



Pérdida de peso con balones gástricos

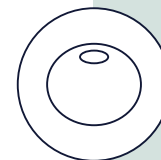

CURVA DE PÉRDIDA DE PESO TRAS LA COLOCACIÓN DEL IGB ORBERA¹

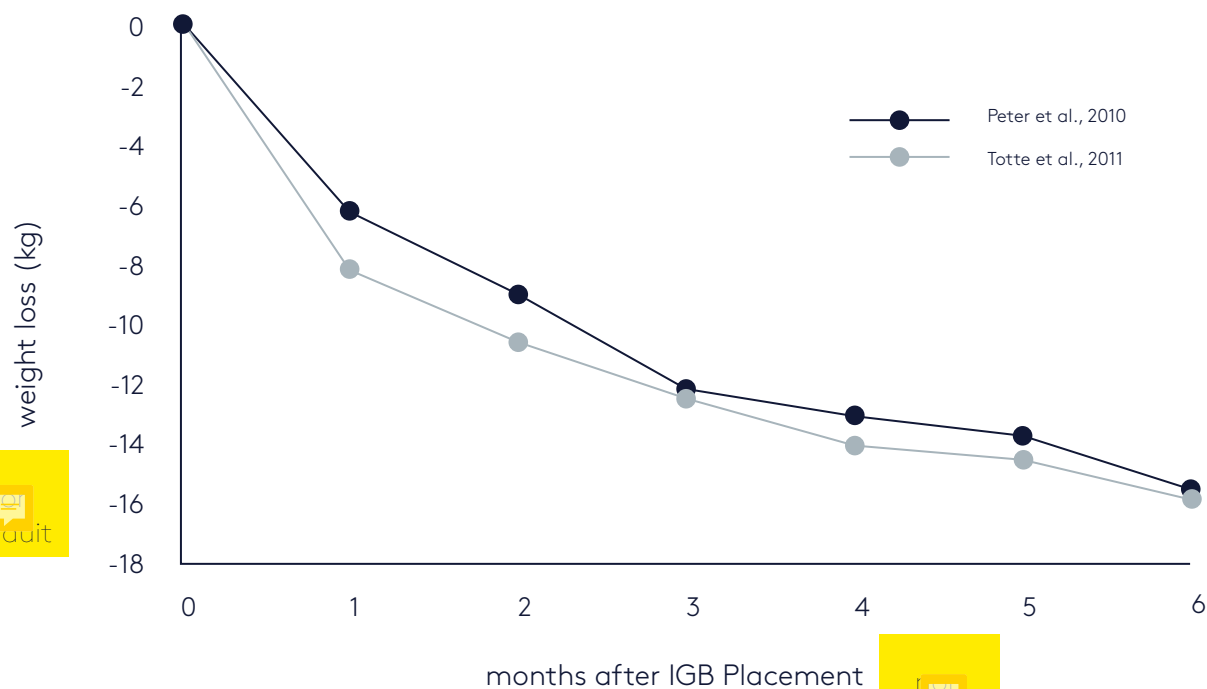

80%

de la pérdida de peso con un balón Orbera de 6 meses se produce en los primeros tres meses¹

Estos resultados son del balón gástrico Orbera

1. Gaur S, et al. Gastrointestinal endoscopy, 2015 81: 1330-1336

¿Volveré a recuperar peso?

Ningún programa de pérdida de peso hace magia



El Programa Elipse está diseñado para ayudarle a que pierda peso a la vez que modifica su estilo de vida y sus hábitos de alimentación*

*El resultado varía de un paciente a otro. Un pequeño porcentaje de pacientes no responde al tratamiento. **El balón Elipse debe combinarse con un programa supervisado de nutrición y modificación del comportamiento. Allurion recomienda un programa de seguimiento de 6 meses. La duración del programa es a discreción del médico y puede cambiar en función del perfil del paciente.



Como parte del programa, trabajará con un médico y un nutricionista que le ayudarán a establecer un estilo de vida que aumente la probabilidad de que no suba de peso**

CONSIGA RESULTADOS REALES

24


«Mi experiencia con el Programa Elipse ha sido extraordinaria, y he seguido perdiendo peso después de eliminar el balón»

Vanessa, Bélgica
pasó de un IMC 33,6 a un IMC 28,5


¿Puedo esperar algún efecto secundario?

Los efectos secundarios más frecuentes desaparecen en la primera semana¹

- Los síntomas se pueden controlar con la medicación que le recete su médico.
- La mayoría de personas vuelve a su actividad diaria normal durante los primeros días.
- Un estudio clínico con 8506 pacientes de Orbera demostró que los efectos secundarios más frecuentes fueron²

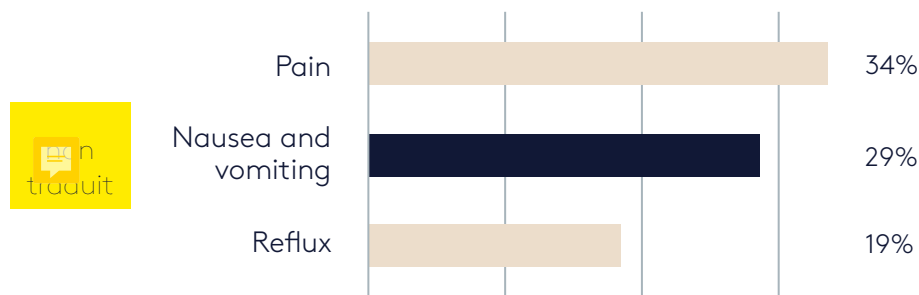

1. Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul;13(7):1174-1182
2. Abu Dayyeh BK. Gastrointestinal Endoscopy. 2015;82(3):425-438

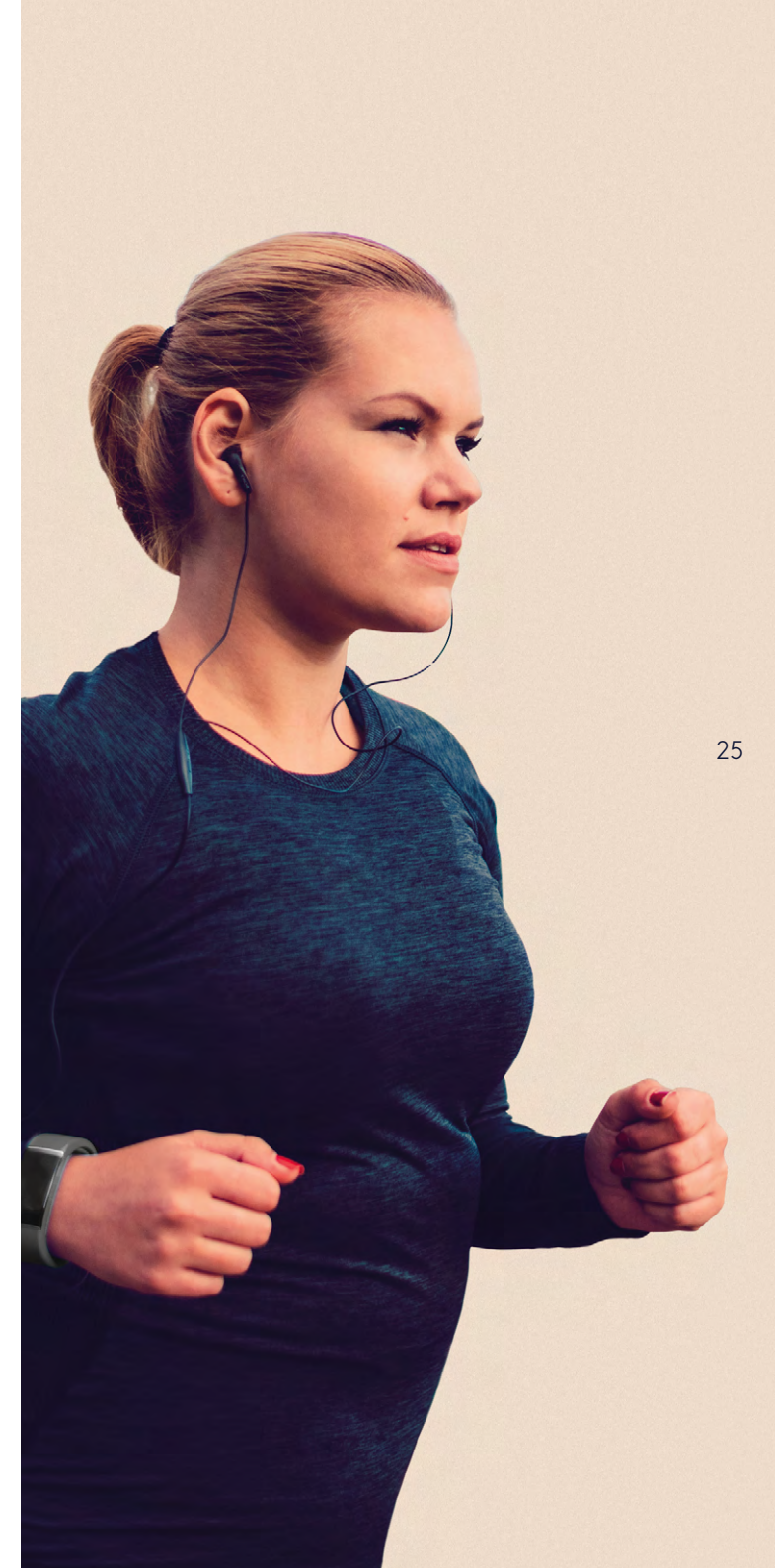

Aprovechar al máximo el Programa Elipse





Antes

Aprovechar al máximo el Programa Elipse



Su médico le guiará durante el proceso, aunque le ofrecemos los siguientes consejos

- Algunas personas sufren efectos secundarios después de la colocación. Los efectos secundarios más frecuentes desaparecen en la primera semana¹
- Puede ser una buena idea que se tome un par de días de vacaciones después de la colocación del balón o que se lo coloquen un viernes
- Pida a un amigo o un familiar que esté disponible en caso de que necesite ayuda con sus actividades domésticas




Durante

Aprovechar al máximo el Programa Elipse



Cumpla su plan de alimentación saludable

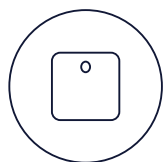

Utilice su báscula Elipse y la app para supervisar su progreso



Colabore con su nutricionista y su médico*



Intente establecer un estilo de vida más saludable haciendo ejercicio de manera habitual y reduciendo su ingesta de alcohol



Haga que sus amigos y familiares le brinden apoyo para ayudarle a comer de manera saludable y mantenerse activo

*El balón Elipse debe combinarse con un programa supervisado de nutrición y modificación del comportamiento. Allurion recomienda un programa de seguimiento de 6 meses. La duración del programa es a discreción del médico y puede cambiar en función del perfil del paciente.

Después

Aprovechar al máximo el Programa Elipse



El proceso de pérdida de peso continúa después de eliminar el balón

- Mantener su plan de alimentación saludable
- Continuar utilizando su báscula Elipse y la app para supervisar su progreso
- Intentar mantener un estilo de vida más saludable haciendo ejercicio de manera habitual y reduciendo su ingesta de alcohol
- Pregunte a su profesional sanitario si necesita asesoramiento o apoyo adicional
- Recuerde a sus amigos y familiares que deberá seguir comiendo de manera saludable y mantenerse activo





Cambio de vida

Vanessa, 38, Bélgica

-13kg /29lbs*

- Fecha de colocación del balón Elipse: Enero 2017
- De obesa con IMC 33,6 hasta IMC 28,5

"Soy una mujer policía, por lo que un buen estado físico es muy importante para mí. Mi experiencia con el Programa Elipse ha sido extraordinaria, y he seguido perdiendo peso después de eliminar el balón^{*}"

Paciente real de Elipse

^{*}El resultado varía de un paciente a otro. Un pequeño porcentaje de pacientes no responde al tratamiento.

Testimonios

Inspire a otros: comparta las historias de éxito de sus pacientes

«Antes, pesaba tanto que me costaba moverme y algunos días ni salía de casa. Ahora siento que vuelvo a vivir»

Michael, 67, Reino Unido, en el Daily Mail

«Tragué la cápsula sin demasiada dificultad – Sentí un poco de náuseas pero nada más (...) He perdido 63 centímetros en total y me puedo poner ropa de la talla 44 con toda comodidad»

Kayleigh, 28, Reino Unido, en el Daily Mail – Spire Thames Valley Dr. Humadi

«Ha sido fantástico (...) He perdido 7 kg en 4 semanas, siento que mi energía y mi confianza han vuelto; ¡me cabe ropa que no he usado en 30 años!»

Hetsie, 42, Reino Unido, en Channel 4

«Iba camino de la obesidad (...) He terminado mi tratamiento hace 6 meses pero me sigo sintiendo saciada mucho antes. (...) Perdí 20 kg gracias al balón Elipse»

Véronique, 50, Francia, en Femme Actuelle

Paciente real de Elipse

*El resultado varía de un paciente a otro. Un pequeño porcentaje de pacientes no responde al tratamiento.



Cinco puntos que recordar



01

Su médico decidirá si es apto para el Programa Elipse

1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Abr; 29(4): 1236-1241
2. Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul;13(7):1174-1182.
3. Al Sabah, S., et al. SOARD. 2018, 14(3), 311-317.
4. Machytka E et al. Endoscopy. 2017 Feb; 49(2): 154-160.



02

Los balones gástricos no hacen magia y necesitará hacer cambios permanentes en su estilo de vida

5. Genco et al. Obes Surg 2017, DOI 10.1007/s11695-017-2877-1
6. Al-Subaie S et al. Int J Surg. 2017 Dic; 48:16-22.
7. Ienca et al. Enviado a SOARD. Abstract A278, presentado en la Semana de la Obesidad, 2018, Nashville, EE.UU.



03

Después de unas 16 semanas de tratamiento con Elipse, los pacientes pierden una media de 10 a 15 kg o aproximadamente un 10 a 15% de su peso corporal^{1 a 10}

8. Genco et al. Enviado a SOARD. Abstract A185, presentado en la Semana de la Obesidad, 2018, Nashville, EE.UU.
9. Ienca et al. Abstract 237, presentado en IFSO 2019, Madrid, España.
10. Raftopoulos et al. Abstract 1978. Presentado en ACS 2019, San Francisco, EE.UU.



04

Obtenga un asesoramiento multidisciplinar durante su proceso de pérdida de peso*

*El balón Elipse debe combinarse con un programa supervisado de nutrición y modificación del comportamiento. Allurion recomienda un programa de seguimiento de 6 meses. La duración del programa es a discreción del médico y puede cambiar en función del perfil del paciente.



05

Descubra una sencilla revolución: sin cirugía, endoscopia ni anestesia**

**Solo en muy raros casos, el balón Elipse puede requerir endoscopia o intervención quirúrgica para su extracción.

Empiece su programa de pérdida de peso, únase al Programa Elipse



Este dispositivo es un producto sanitario regulado que tiene el Marcado CE de acuerdo con las normas europeas. El balón Elipse es una ayuda temporal para perder peso destinado a adultos mayores de 18 años que sean obesos o tengan sobrepeso, según se determina con un índice de masa corporal (IMC) ≥ 27 . La colocación del balón Elipse está reservada a profesionales sanitarios que estén familiarizados con el uso del mismo. El balón Elipse debe combinarse con un programa supervisado de nutrición y modificación del comportamiento. Algunos individuos pueden no ser aptos para recibir el balón Elipse. Su médico leerá su historial médico y le hará un examen físico para determinar si es apto. Es importante que proporcione al médico un historial médico completo y preciso. Este contenido está dirigido a un público objetivo fuera de EE.UU.